



採取～郵送の流れ

PCR検査 唾液採取用キット セット内容

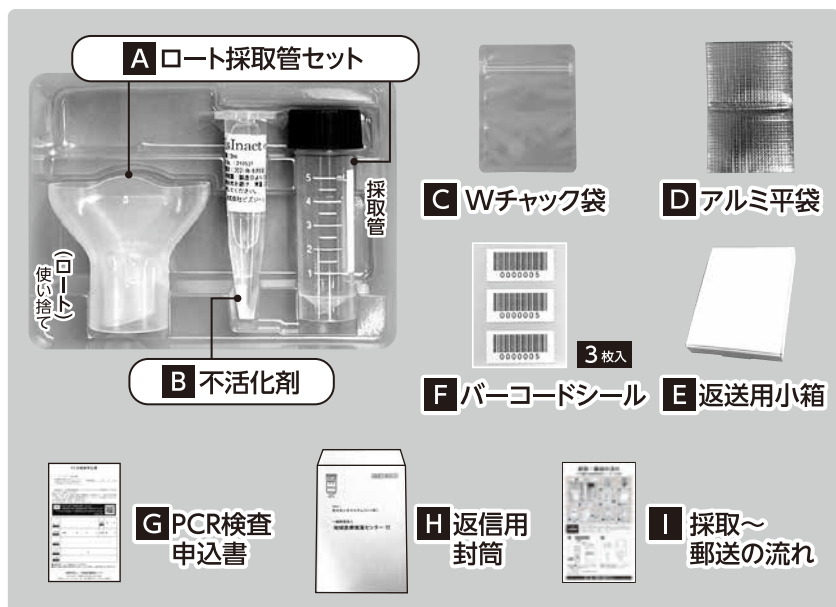

注意事項

採取前1時間程度は、飲食や歯磨き、うがい薬を使用したうがいはしないでください。また、採取時はなるべく清潔な環境で手を洗い採取してください。

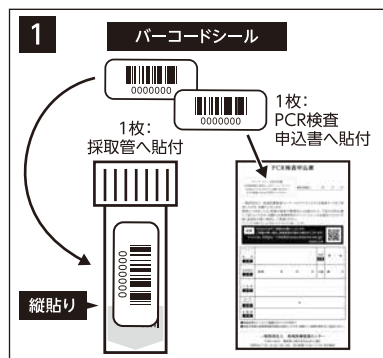


採取管へ**F**のバーコードシールを貼り付け、**G**のPCR検査申込書へもバーコードシールを貼ります。

※フタに被らないように容器本体に縦貼りで貼ってください。




Aの採取管に付属の「ロート」をしっかり取り付け、唾液を採取してください。

表 面 裏面もご確認ください。

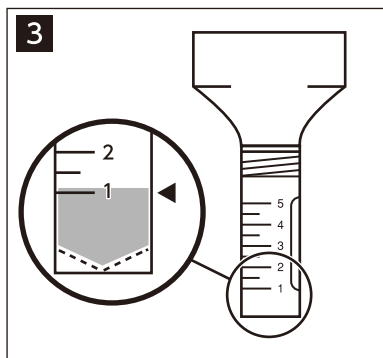


唾液を採取管の目盛り1くらいまで入れてください。
泡などなるべく入らないよう、お気をつけてください。

※正しい検査のために唾液の量にご注意ください。

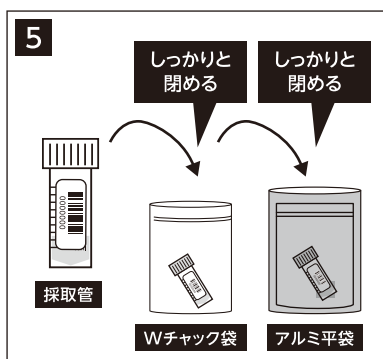

採取管を**C**のWチャック袋に入れ、**D**のアルミ平袋へ入れます。
各袋がしっかりとじているか確認してください。


※密封されていない場合、正しい測定が出来ない場合がございます。

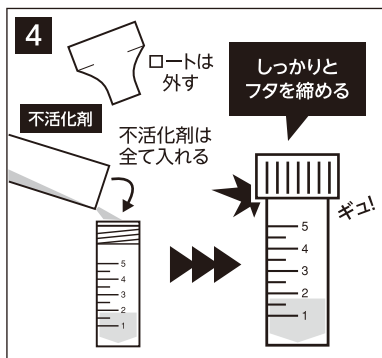

「ロート」を外し、**B**の不活化剤を採取管に入れて、フタをしっかりと締めてください。

※フタが締まっていないと検査が出来ない場合があります。

※「ロート」はプラごみとして捨ててください。

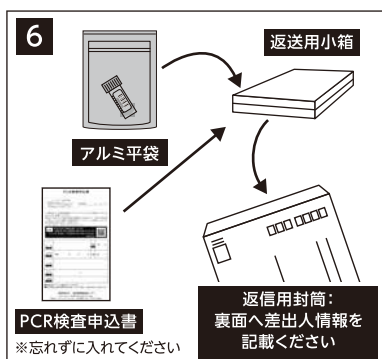

GのPCR検査申込書に必要事項を記入し、バーコードシールを貼って**D**のアルミ平袋と一緒に返信用小箱に入れてください。

・郵送時：返信用封筒に入れてポスト投函してください。

※WEB登録は必須ですので、忘れずに登録してください。

※封筒の裏面には差出人のお名前と住所をご記入ください。

Fのバーコードシール残り1枚はお客様のお手元で大切に保管してください。
お問合せの際などに必要になる場合がございます。